

SALINmini 抗敏鹽療機

使用說明書

請保管此說明書以供將來參考之用

介紹

鹽療機是一件獲得國際獎項，而且高效節能的醫療產品。它會釋放（天然微米鹽每粒 5 微米）於空氣中，同時亦會透過 G4 前置過濾網過濾灰塵及其他塵埃。



如何使用鹽療機？

若您是第一次購買鹽療機，機器中已裝有微米鹽過濾盒。之後可另行購買微米鹽過濾盒以作更換。

建議應該將機器放在床旁邊的桌子並面向您以達至最高效能。

當您需要關掉機器，請拔出插在機身後電線或關掉插頭的電源。

每天使用鹽療機的時間

建議每晚於睡覺時最少使用 8 小時，有需要可延長使用時間。請盡量多使用鹽療機，特別是在使用的第一個月，亦建議在之後的一整年也請持續地使用機器。

適合使用性

這是一個溫和、非入侵性和天然的方法，因此適合所有人使用，包括嬰兒、孕婦、長者、正進行低鹽減肥中的人、剛完成手術的人或所有想要維持身體健康的人。

若使用後呼吸道問題症狀持續或對自己的健康有任何疑問，請諮詢您的家庭醫生。

微米鹽過濾盒

微米鹽過濾盒裝滿了 100%的天然岩鹽並含有超過 98%的氯化鈉和氯化鈣、鎂及碘等重要微量元素。微米鹽來自歐洲最大，位於羅馬尼亞的鹽礦。鹽礦中有 14 個鹽室，每年有不少來自世界各地的旅客到訪此鹽礦享受鹽療。

更換微米鹽過濾盒

以優化機器的效能，建議使用後 4 個月更換微米鹽過濾盒。請跟從下面的指示更換新的過濾盒：

1. 拔出插在電座的插頭
2. 拔出插在機身後電線
3. 一手拿着灰色的底座，一手拿着機身，然後拉開兩邊以拆開深灰色的底座
4. 將手放在微米鹽過濾盒上然後將舊的過濾盒拿走。
5. 將新的微米鹽過濾盒放入機中，確保微米鹽面向外面。
6. 將灰色的底座插入原來的位
7. 插入機身後電線和電座的插頭

保存及清潔

當您不使用鹽療機時，請將機器存放在通爽的地方並放入原廠包裝盒內。

清潔機身時可使用抹布小心地擦拭機身。



注意事項

鹽療機必須在乾爽環境中運作。使用時的濕度水平應該在 40%-60% 之間，最理想的濕度水平為 50%。如果濕度過高，過濾盒中的鹽會吸收空氣中的水分，不但影響微米鹽粒子的散發和減低鹽粒子的有效性，在極端情況下，更會損壞過濾盒而導致漏水情況。

為確保鹽療機的正常運作，建議：

- 用濕度計監測房間相對濕度水平
- 使用前使用抽濕機以降低室內濕度。
- 於春夏潮濕期間，可以關閉窗戶及調較空調(23-24 °C)以阻隔室外濕氣。
- 使用後應存放在乾爽陰涼的地方，建議放回原廠包裝盒內並放入防潮珠。

潮濕的環境下有利塵蟎滋生，而塵蟎更會加劇哮喘和呼吸道過敏的情況。

若使用後呼吸道問題症狀持續或對自己的健康有任何疑問，請諮詢您的家庭醫生。

港澳獨家代理商：

健和醫療保健有限公司 | 查詢熱線：3106 0033 | WhatsApp：6626 9538 | 網址：www.sleepkinwood.com

(羅馬尼亞製造)

SALINplus 抗敏鹽療機

使用說明書

請保管此說明書以供將來參考之用。

鹽療機 運作原理

鹽療機的功能為釋放微米鹽於空氣中讓使用者吸入至肺部，同時亦能過濾室內空氣中的灰塵、花粉和寵物毛髮。鹽療機採用來自羅馬尼亞 Slanic Prahova 鹽礦的天然岩鹽，該鹽礦因其治療質量而聞名於世。

鹽療機會釋放出 1 至 5 微米大小的微米鹽(足以深入肺部)，24 小時內的微米鹽總釋放量會少於 0.1 克，因此適合所有人士使用。微米鹽含有超過 98%的氯化鈉及其他微量元素包括氯化鈣、鎂及碘。

使用說明

建議平均每晚使用 8 小時，由於鹽療機是一種輔助性治療方法，需要長期並持續地使用。

使用時請將鹽療機放置於與床相約的高度，靠近頭部少於 2 米的距離，建議可放在床旁邊的桌子並於睡覺時使用。需要關掉鹽療機時可直接拔出電線或關掉插頭的電源。使用時將風扇調到最高速度可達至鹽療機的最高效能，若覺得操作時聲音過大，可調節風扇速度以降低聲音。如聲音仍然沒有降低，可以將鹽療機放在更遠的位置。

更換微米鹽過濾盒

建議於購買後 4 個月後更換微米鹽過濾盒。請跟從下面的指示更換新的微米鹽過濾盒。




後面



第一步：
拔出插在機身後電線

側面

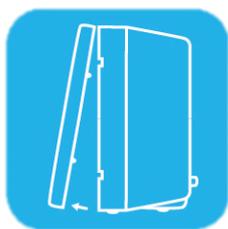

第二步：
拆開前蓋

側面



第三步：
將機身向下放，然後
輕輕將舊微米鹽過濾
盒搖出

底面



第四步：
放入新的微米鹽過濾
盒，確保微米鹽面向
外面和過濾盒凹槽與
機身成一直線

側面



第五步：
先將前蓋插入下方的
凹槽然後再插入上方
的凹槽

⚠ 注意事項

鹽療機必須在乾爽環境中運作。使用時的濕度水平應該在 40%-60%之間，最理想的濕度水平為 50%。如果濕度過高，過濾盒中的鹽會吸收空氣中的水分，不但影響微米鹽粒子的散發和減低鹽粒子的有效性，在極端情況下，更會損壞過濾盒而導致漏水情況。

為確保鹽療機的正常運作，建議：

- 用濕度計監測房間相對濕度水平
- 使用前使用抽濕機以降低室內濕度。
- 於春夏潮濕期間，可以關閉窗戶及調較空調(23-24°C)以阻隔室外濕氣。
- 使用後應存放在乾燥陰涼的地方，建議放回原廠包裝盒內並放入防潮珠。

潮濕的環境下有利塵蟎滋生，而塵蟎更會加劇哮喘和呼吸道過敏的情況。
若使用後呼吸道問題症狀持續或對自己的健康有任何疑問，請諮詢您的家庭醫生。

港澳獨家代理商：

健和醫療保健有限公司 | 查詢熱線：3106 0033 | WhatsApp：6626 9538 | 網址：www.sleepkinwood.com

(羅馬尼亞製造)